



Monitor de temperatura, para termo descongelar semen CITO

SKU: C752.4

Price: U\$S 26,33

Categories: [PARA DESCONGELAR SEMEN](#)

Product Description



TERMO DESCONGELADOR DE SEMEN PAJUELAS 12V & 220V - CITO USA

SKU: C751.3

Price: U\$S 745,94

Categories: [PARA DESCONGELAR SEMEN](#)

Product Description

Probado en campo y aprobado para descongelar el semen a una temperatura óptima y constante controlada por un componente electrónico sensible y preciso. Fabricada en plástico ABS de alta calidad lo que la hace muy resistente y mantiene sus componentes protegidos, para usar muchos años.

Instrucciones:

- Llene el descongelador Cito con agua corriente limpia.
- Conecte el enchufe a la fuente de alimentación de 12 o 220 V la luz roja se encenderá.
- Espere hasta que se encienda la luz verde que indica la temperatura ideal.
- Agite el agua con la cesta interior para asegurarse de que la temperatura sea homogénea.
- El descongelador Cito está listo para recibir las dosis de semen.
- El descongelador Cito está calibrado de fábrica para funcionar a 35 6°C. Sin embargo si desea cambiar esta temperatura es posible simplemente retire la cubierta inferior y ajústela girando una perilla.
- Acompaña a la cesta a levantar las dosis de semen termómetro para calibración y manual.

Ventajas:

- Mayor número de crías nacidas por año.
- Agilidad y precisión en la preparación y mantenimiento del agua de descongelación a 35 5°C mediante control electrónico.
- Aumento de la tasa de embarazo con ahorro en las dosis de semen generando un aumento en el índice de fertilidad del rebaño.
- Reducción de tiempo y mano de obra en la ejecución del servicio en IATF se reduce alrededor de un minuto por vaca.
- En IATF optimiza los protocolos con mayor % de embarazo.
- Reducción del número de vacas secas al disminuir los intervalos de parto y los períodos de sequía.
- Mejora el rendimiento de todas las categorías. Mejora el rendimiento de los INSEMINADORES.
- Mejora la fertilidad del semen al preservar espermatozoides más viables.

[VER MANUAL DE INSTRUCCIONES AQUI - DESCONGELADOR DE SEMEN CITO USA](#)