

INMOVILIZADOR ELECTRONICO PARA GANADO - INALÁMBRICO

SKU: C677.3

Price: U\$S 450,00

Categories: [INMOVILIZACION MECANICA](#)



Product Description

El inmovilizador de ganado es un equipo desarrollado con la más alta tecnología. Recomendado para proporcionar inmovilización del ganado. Emite ondas electromagnéticas a los músculos, interfiriendo en la comunicación entre el sistema nervioso y el cerebro, impidiendo así el movimiento y el estrés del animal. De esta manera son posibles operaciones como: castración, juego, marcaje, cirugías, tratamientos contra moscardones, entre otras. **Inmovilizador ideal para:** • Castración • Calificación • Cirugías • Retiros de reinitas • Descornar • Tratamiento de pezuñas • Tratamientos para heridas y insectos El inmovilizador bovino emite ondas electromagnéticas a los músculos voluntarios del animal, inmovilizándolo e inhibiendo el dolor. • Fácil manejo a la hora de inmovilizar al animal. • Sin hilo. • Inmoviliza sin causar estrés al animal. • El animal vuelve a la actividad inmediatamente después de retirar el equipo. • Ahorrando tiempo y dinero • Batería recargable • Viene con: Bolsa, cargador de batería y manual. **Cómo utilizar:** 1. Inserte el inmovilizador en el ano del animal. 2. Encienda el dispositivo girando el botón y aumentando suavemente la intensidad hasta inmovilizar al animal (observar al animal, cuando dobla el lomo ya está inmovilizado). Si la intensidad es mayor de la necesaria, el animal puede perder fuerza en las patas y caerse. En este caso, retire el inmovilizador y espere a que el animal se levante antes de volver a colocarlo. **Recarga de batería:** 1. Conecte el cargador al inmovilizador. 2. Enchufe el cargador a la toma de corriente (110V o 220V). 3. Cuando esté conectado correctamente, el LED rojo se iluminará. 4. Desenchufe después de 6 horas de carga. Nota: Recargue inmediatamente después de su uso y si no se usa con frecuencia, recárguelo cada 30 días para conservarlo. **Atención: no utilice el equipo durante el proceso de recarga de la batería.**